



HeartSine GATEWAY™

CON LIFELINKCENTRAL™ PROGRAMMA DI GESTIONE DAE

- > Connessione wireless
- > Automonitoraggio
- > Retrocompatibile
- > Bassi costi di proprietà

HeartSine Gateway™ permette ai responsabili dei DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) di gestire una flotta di DAE HeartSine installati in uno o più siti ricevendo informazioni da remoto sullo stato di ogni singolo DAE.

Quando integrato in un **samaritan PAD 350P, 360P o 500P**, **HeartSine Gateway™** comunica, tramite Wi-Fi, con la piattaforma **LIFELINKcentral™**, aggiornando il risultato dell'autotest settimanale, incluso lo stato della batteria.

Pronto all'uso con semplicità

- > **CONNESSO**
Comunica tramite Wi-Fi con LIFELINKcentral™ per permettere ai DAE su uno o più siti di essere gestiti da remoto.
- > **LIFELINKcentral™**
Monitora lo stato dei DAE, la scadenza dei Pad-Pak e dei Pediatric-Pak.
- > **AUTOMONITORAGGIO**
Monitora il proprio stato, mandando alert e-mail quando la batteria sta per scaricarsi o la temperatura è troppo bassa o alta.

Fatto per Te

- > **RETROCOMPATIBILE**
Compatibile con samaritan PAD 350P, 360P e 500P.
- > **FACILE DA ATTIVARE**
Configurazione lineare tramite lo strumento di configurazione dell'HeartSine Gateway.

Facile da gestire

- > **AUTOALIMENTATO**
Preserva la batteria del DAE perché è dotato di proprie batterie.
- > **PROTETTO DA AMBIENTI OSTILI**
Certificato IP56 per una massima protezione da liquidi e polveri.



Una volta inserito HeartSine Gateway™ può essere rimosso solo con uno specifico strumento (fornito in dotazione).

HeartSine GATEWAY™ PANORAMICA TECNICA



CONTROLLI

Tasto di Attivazione: quando è spento e viene premuto, si accende, se premuto per 6 secondi entra in modalità impostazione, se acceso e premuto fa un autotest.

CONNESSIONE

Connettore: connette HeartSine Gateway™ ai DAE HeartSine.
Micro USB: permette di connettersi al Saver Evo su sistemi Windows.

INTERFACCIA UTENTE

Indicatore di Stato: fornisce informazioni sullo stato di HeartSine Gateway™

CARATTERISTICHE FISICHE*

* CON BATTERIE INSTALLATE

Dimensioni: 17x7x5 cm
Peso: 0.48Kg

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura Operativa: 0-50°C
Temperatura di Stoccaggio: -10-50°C
Umidità Relativa: 5-95%
Altitudine: 0-4572m
IP: 56
Urti: MIL-STD 810F: 2000 Metodo 516.5 Procedura 1
Vibrazioni: MIL-STD 810F: 2000 Metodo 514.5 Procedura 1 Categorie 4 e 7
Compatibilità elettromagnetica: IEC/EN 60601-1-2

BATTERIA

Tipo: Diossido di Litio Manganese
Numero: 6205
Numero IEC: CR17345
Quantità: 4
Peso (per batteria): 17g
Sistema: Diossido di Litio Manganese/Elettrolita Organico
Categoria UL: MH 13654(N)
Voltaggio Nominale (per batteria): 3V
Carico Capacitivo Tipico: 100 Ohm, a 20°C, 1550mAh fino a 2V
Volume: 7cm3

COMUNICAZIONE

Wireless 802.11 b/g/n verso LIFELINKcentral™ o LIFENET™
Micro USB verso software Saver Evo

COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutti i samaritan PAD prodotti a partire dal 2013 compreso.

GARANZIA

2 anni.