



TERMOPLASTIC S.r.l.
Via Monte Rosa 3 – 00071 Pomezia (Roma)
www.termoplastic.it +39 06 9180 1487



modello: MM240H – codice: 99.000800
VISIERA PROTETTIVA DPI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA
- RIF. REGOLAMENTO (UE) 2016/425 -

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Prodotto fabbricato in Italia da Termoplastic s.r.l. - stabilimento in Via Monte Rosa 3 - 00071 Pomezia (Roma)

Indirizzo Internet del produttore: www.termoplastic.it

Il dispositivo è stato realizzato in conformità ai requisiti indicati dal regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale

La normativa tecnica utilizzata come riferimento nella produzione dei DPI è la UNI EN 166: 2004 - Protezione personale degli occhi

STOCCAGGIO, USO E MANUTENZIONE

conservare in un luogo fresco e asciutto

PULIZIA:

pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone neutro. utilizzare un panno morbido con una leggera pressione. risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno umido o microfibra.

spolverare con un panno morbido e umido o in microfibra.

non utilizzare sostanze abrasive; panni asciutti o ruvidi possono provocare graffi sulla superficie.

DISINFEZIONE:

utilizzare disinfettanti non aggressivi, in particolare evitare l'uso di: • prodotti non inalabili • solventi (acetone, benzina, alcool, tetracloruro di carbonio), • diluenti sintetici, • sostanze grasse • sostanze non compatibili con la plastica

CAMPO D'IMPIEGO, CAPACITÀ DI PROTEZIONE E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

offre protezione contro goccioline e schizzi di liquidi (rif. § 7.2.4 UNI EN 166: 2004);

è un dispositivo di protezione individuale di categoria III idoneo a proteggere da rischi che possono provocare conseguenze molto gravi quali morte o danni irreversibili alla salute

il DPI è idoneo a proteggere il viso da goccioline contenenti agenti biologici nocivi;

Applicare sul viso. Usare la cinghia regolabile per fissarlo sulla fronte. La visiera è riutilizzabile dopo la disinfezione.

ACCESSORI E RICAMBI.

il DPI non ha accessori;

TERMINE DI SCADENZA


anno e mese di scadenza sono riportati sull'etichetta;

TIPO DI IMBALLAGGIO IDONEO AL TRASPORTO

il DPI non necessita di imballaggi o cure particolari per il trasporto;

MATERIALI

i materiali utilizzati per i componenti sono testati per non provocare reazioni allergiche a soggetti predisposti

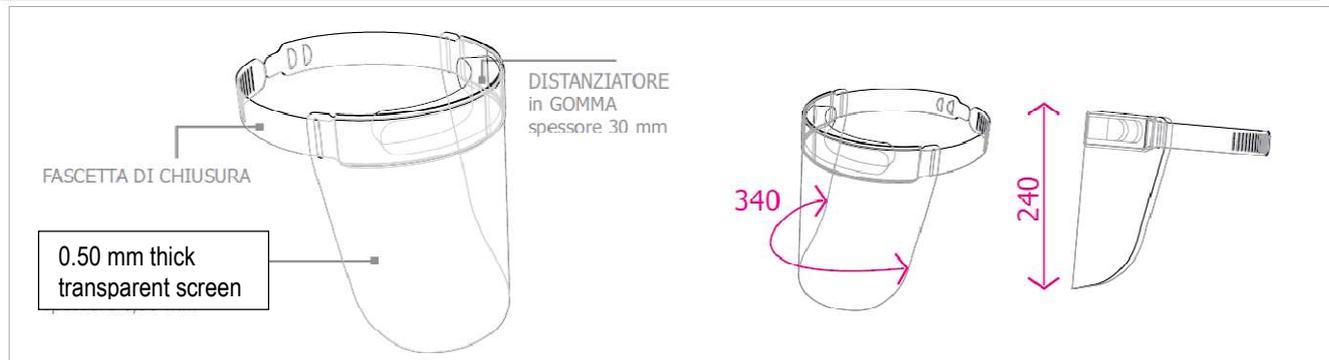

CONFEZIONE:

SINGOLA CELLOFANATA

OGNI VISIERA HA UN FILM PROTETTIVO CHE ANDRÀ RIMOSSO AL PRIMO UTILIZZO ED È GIÀ PRONTA PER ESSERE CALZATA. PER REGOLARE LA CHIUSURA SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLE FIGURE.

