



Mascherina FFP2 Bianca



CODICE PRODOTTO

MD-FFP2

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mascherina FFP2 con elastici auricolari, pieghevole. Confezione singola.
Ergonomica, adatta a tutti i tipi di viso. Grande superficie filtrante
Nasello regolabile posto all'interno degli strati del materiale filtrante nichel-free.

Resistenza respiratoria ≤ 300 Pa.
Portata d'aria ≥ 95 l/min.
Capacità di filtrazione garantita $> 98\%$.
Latex free.

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria alimentare e HoReCa, industria e pulizia, cosmesi ed estetica, veterinario, settore automotive, settore antifuoristrada e settore dei tatuatori.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di III categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425

CERTIFICATO CE DPI N°

DK-PPE001973 i01 - scad. 10/11/2030

ORGANISMO NOTIFICATO DPI

TÜV SÜD DANMARK ApS, Johanne Møllers Passage 1, 3. sal • 1799 Copenhagen V • Denmark (NB identification n° 2443)

Dettagli

CODICE	CODICE EAN	COLORE
MD-FFP2	8055719540103	Bianco

MATERIA PRIMA

Cinque strati: polipropilene / polipropilene / polipropilene / polietilene & polietilene tereftalato / polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza respiratoria ≤ 300 Pa.
Portata d'aria ≥ 95 l/min.
Capacità di filtrazione garantita $> 98\%$.

AVVERTENZE


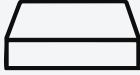

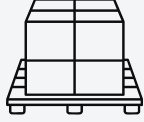
Non sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.

- Non utilizzare maschere protettive o entrare o rimanere in un'area contaminata nelle seguenti circostanze:
 - L'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno
 - Se senti odore o sapore contaminato
 - Per la protezione da gas o vapori
 - Contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita o la salute
 - Per operazioni di sabbiatura, pittura spray e amianto
 - In atmosfera sottomarina, incendio ed esplosiva
- Non modificare o utilizzare in modo improprio la maschera
- Non utilizzare la maschera protettiva con i peli del viso o qualsiasi altra condizione che possa impedire una buona tenuta del viso.

NORME DI RIFERIMENTO

DPI di III Categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425
EN 149:2001+ A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Singola Unità	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallettizzazione
	1 pezzo	40 pezzi	2.000 pezzi (50 box)	12 cartoni
				
	Busta stampata	Box in cartoncino	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x210 cm
ISTRUZIONI D'USO	<p>1. Rivolgere la maschera in modo che il clip per per il naso si trovi verso l'alto.</p> <p>2. Tenere la maschera sul viso con le mani e posizionarla contro il mento con il lato con le scritte rivolto verso l'esterno.</p> <p>3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.</p> <p>4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio nasale in metallo, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita su entrambi i lati lungo il fermaglio nasale finché il fermaglio nasale non è completamente premuto nella forma del ponte del naso.</p> <p>Controllo della vestibilità:</p> <p>a. Per testare l'aderenza della maschera protettiva, avvolgere entrambe le mani sul respiratore e inspirare energicamente. Se si avverte un flusso d'aria nell'area del naso, regolare o stringere nuovamente la clip.</p> <p>b. Cambiare immediatamente la maschera se la respirazione diventa difficile o la maschera viene danneggiata o distorta.</p> <p>c. Cambiare la maschera se non è possibile ottenere una corretta tenuta del viso.</p>			
STOCCAGGIO	<p>Conservare al riparo da sorgenti inquinanti, calore ed umidità.</p> <p>Conservare ad una temperatura tra -5°C e +38°C.</p>			
SMALTIMENTO	<p>Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.</p>			
VALIDITÀ	<p>5 anni dalla data di produzione</p>			
FABBRICANTE	<p>MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY</p>			
LUOGO DI PRODUZIONE	<p>Cina</p>			
IMPORTATORE	<p>Med Consulting Srl - Via Revello 38/M, 12037 Saluzzo (CN)</p>			

